

راهنمای استفاده از دستگاه سونیکید پر تابل کمپانی Wallach-Summit Doppler مدل L250



WALLACH
SummitDoppler™
a WALLACH brand

www.wallachsurgical.com

* متعلقات دستگاه :



(۲) پروب



(۱) بدنه اصلی دستگاه



(۴) باتری




(۳) کابل ارتباطی پروب و دستگاه



(۶) کابل برق دستگاه



(۵) آداپتور

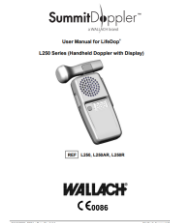


(۶) دفترچه راهنما

* نکات محیطی عمومی و کاربری :


- (۱) دستگاه را دور از رطوبت و یا نور مستقیم آفتاب قرار دهید.
- (۲) دستگاه را در جایی که نوسان شدید دمائی دارد، قرار ندهید.
- (۳) با دست خیس و مرطوب به دستگاه دست نزنید.
- (۴) از قرار دادن وسایل فلزی و مغناطیسی مانند موبایل نزدیک دستگاه خودداری نمایید.

* نمای بالا و سمت راست دستگاه :

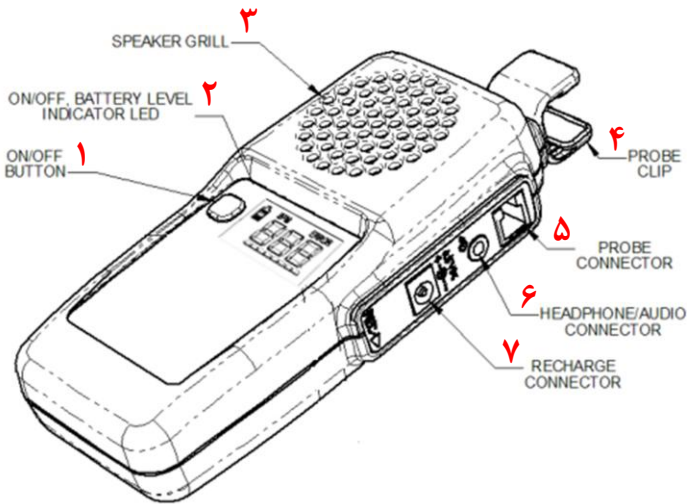


- (۱) دکمه روشن و خاموش
- (۲) چراغ نمایشگر میزان شارژ باتری
- (۳) بلندگو
- (۴) نگهدارنده پروب
- (۵) محل اتصال پروب
- (۶) محل اتصال هدفن
- (۷) محل اتصال آداپتور

* نمای پشت و سمت چپ دستگاه :

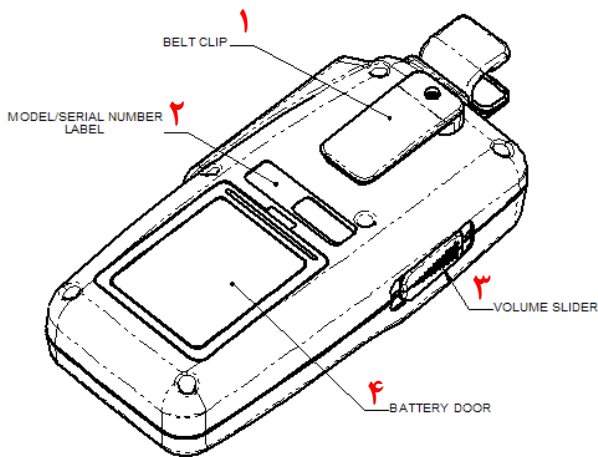

- (۱) نگهدارنده دستگاه به کمربند
- (۲) برچسب شماره سریال
- (۳) تنظیم کننده صدای دستگاه
- (۴) درب باتری


* صفحه نمایش دستگاه :

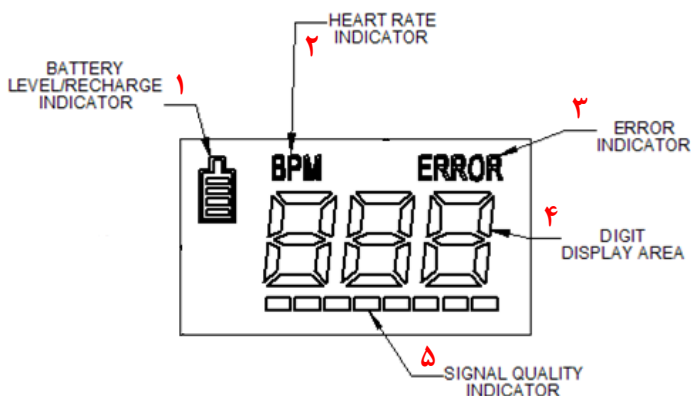

- (۱) نمایشگر وضعیت باتری
- (۲) نمایشگر ضربان قلب
- (۳) نمایشگر خطا در دستگاه
- (۴) نمایشگر عددی
- (۵) نمایشگر کیفیت سیگنال

* روشن نمودن دستگاه :

ابتدا از وجود باتری در دستگاه مطمئن شوید.

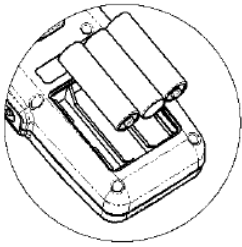


* نکته : از باتری های غیر قابل شارژ استفاده ننمائید.

* شارژ نمودن دستگاه :

شارژ اولیه : مطابق شکل ذیل آداپتور را به دستگاه متصل نموده و به مدت ۸ ساعت جهت شارژ اولیه توسط کابل برق، دستگاه را به برق وصل نمائید.

شارژ مجدد : پس از اتمام کامل شارژ باتری در هر دور استفاده، باتری به طور کامل شارژ گردد و مجدد مورد استفاده قرار گیرد.

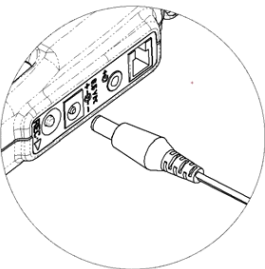

* نکته : هنگامی که دستگاه در حال شارژ توسط آداپتور می باشد، دستگاه روشن نمی گردد.

پس از شارژ باتری، آداپتور را از دستگاه جدا نموده و سپس کلید روشن/خاموش را زده و از دستگاه استفاده نمائید.

* پروب :



جهت استفاده از پروب، آن را به ژل آغشته نمائید.

برای تمیز کردن پروب از الکل و سایر مواد شیمیایی جداً خودداری فرمایید.

* خطاهای دستگاه :

Er7 : عدم شارژ و یا معیوب بودن باتری