


راهنمای استفاده سریع دستگاه فتال مانیتورینگ (NST) کمپانی Bionet مدل FC700

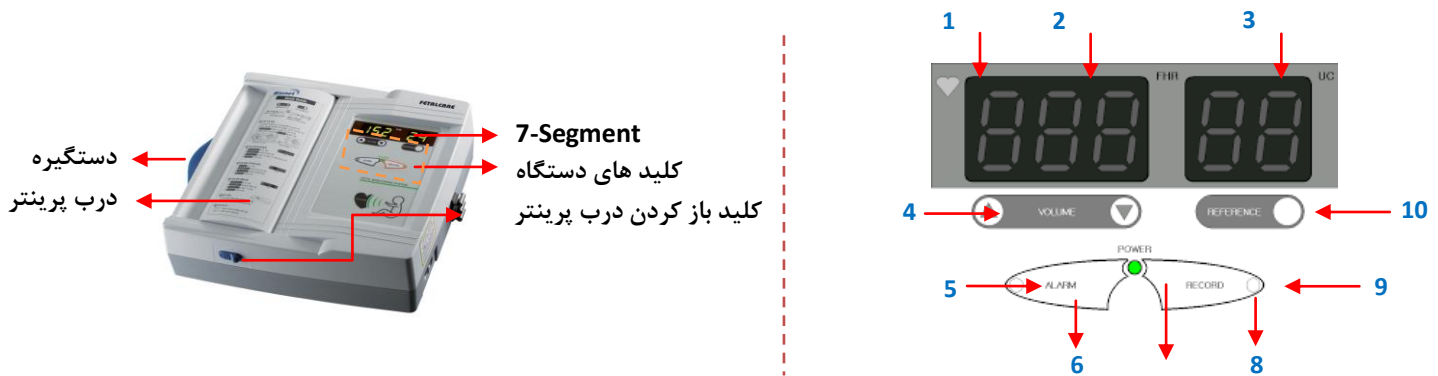

* کلیدهای دستگاه :

- (۱) نشانگر ضربان قلب می باشد.
- (۲) ضربان قلب جنین را نمایش می دهد.
- (۳) مقدار اندازه گیری شده انقباضات رحمی (UC) را نشان می دهد.
- (۴) کلید شماره ۴، کلید ولوم یا صدا می باشد. در منوی تنظیمات با استفاده از این کلید می توانید مقدار تنظیمات را تغییر دهید.
- (۵) نشانگر روشن و خاموش بودن آلارم است.
- (۶) کلید روشن و خاموش کردن آلارم می باشد.
- اگر آن را برای ۲ ثانیه فشار دهید وارد منوی تنظیمات آلارم می شوید.
- در منوی تنظیمات با استفاده از این کلید می توانید مورد انتخابی را لغو کنید.
- (۷) نشانگر روشن و خاموش بودن دستگاه است.
- (۸) کلید فعال و غیر فعال کردن چاپ می باشد.
- اگر آن را برای ۲ ثانیه فشار دهید دستگاه سریعتر پرینت خواهد گرفت.
- در منوی تنظیمات با استفاده از این کلید می توانید مورد انتخابی را لغو کنید.
- (۹) نشانگر فعال و غیر فعال بودن چاپ است.
- (۱۰) توسط کلید شماره ۱۰، می توانید UC را روی مقدار مرجع قرار دهید.
- اگر آن را برای ۲ ثانیه فشار دهید می توانید تنظیمات دستگاه را ذخیره کنید.
- در منوی تنظیمات با استفاده از این کلید می توانید وارد منوی بعدی شوید.

* نحوه کار با دستگاه :

- دستگاه را به برق متصل کرده و کلید Power آن را در حالت ON قرار دهید و پروب های TOCO و US را به آن وصل نمایید.
- به منظور تست FHR پروب US را به ژل مخصوص آغشته نموده، سپس آن را مطابق شکل زیر به بیمار وصل کنید.
- ضربان قلب جنین را پیدا کنید. در این حالت باید صدای قلب جنین به وضوح شنیده شود و روی صفحه نمایش دستگاه، در قسمت FHR شکل قلب به صورت چشمک زن در می آید و تعداد ضربان قلب جنین به صورت عددی مشاهده خواهد شد.
- در این حالت پروب را بر روی کمر بند محکم نمایید تا حرکت نکند و از شکم بیمار جدا نشود.
- مراحل فوق را برای تست TOCO تکرار نمایید.
- پس از آماده شدن بیمار کلید Reference را به منظور علامت شروع تست فشار دهید.

