





راهنمای استفاده سریع دستگاه سونیکید پرتابل کمیانی Wallach-Summit Doppler مدل L250

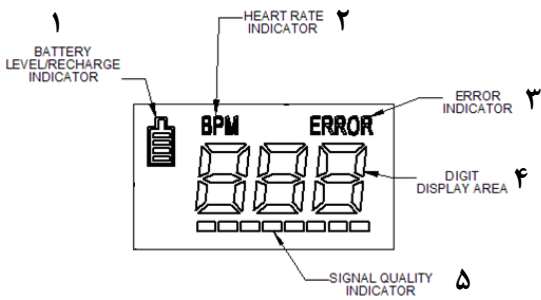

*** صفحه نمایش دستگاه:**

- (۱) نمایشگر وضعیت باتری
- (۲) نمایشگر ضربان قلب
- (۳) نمایشگر خطا در دستگاه
- (۴) نمایشگر عددی
- (۵) نمایشگر کیفیت سیگنال

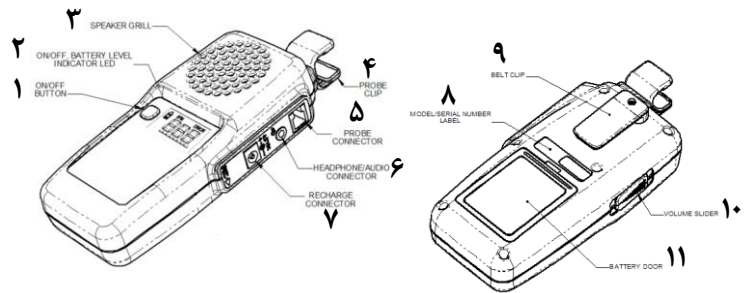

*** مشخصات ظاهری دستگاه:**

- (۱) دکمه روشن و خاموش
- (۲) چراغ نمایشگر میزان شارژ باتری
- (۳) بلندگو
- (۴) نگهدارنده پروب
- (۵) محل اتصال پروب
- (۶) محل اتصال هدفن
- (۷) محل اتصال آداپتور
- (۸) برچسب شماره سریال
- (۹) نگهدارنده دستگاه به کمر بند
- (۱۰) تنظیم کننده صدای دستگاه
- (۱۱) درب باتری

*** نحوه کار با دستگاه:**

(۱) ابتدا از وجود باتری در دستگاه مطمئن شوید.



(۲) شارژ نمودن دستگاه:

❖ شارژ اولیه: مطابق شکل ذیل آداپتور را به دستگاه متصل نموده و به مدت **۸ ساعت جهت شارژ اولیه**

توسط کابل برق، دستگاه را به برق وصل نمایید.

❖ شارژ مجدد: پس از اتمام کامل شارژ باتری در هر دور استفاده، باتری به طور کامل شارژ گردد و مجدد

مورد استفاده قرار گیرد.

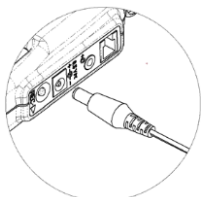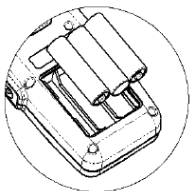

هنگامی که دستگاه در حال شارژ توسط آداپتور می باشد، دستگاه روشن نمی گردد.

خطای Er7: عدم شارژ و یا معیوب بودن باتری

(۳) پس از شارژ باتری، آداپتور را از دستگاه جدا نموده و سپس کلید روشن/خاموش را زده و از دستگاه استفاده نمایید.

(۴) جهت استفاده از پروب، آن را به ژل آغشته نمایید.

(۵) برای تمیز کردن پروب از الکل و سایر مواد شیمیایی جداً خودداری فرمایید.

